

WOW

UNE MARQUE DE BIOTECH DENTAL

SCAN·MATE

BY ARMOR DENTAL

LE PARTENAIRE IDÉAL
DE VOTRE SCANNER
INTRA-ORAL

**Avec l'outil de rétraction Scan-Mate,
privilegiez le confort, le contrôle et l'efficacité,
et obtenez une qualité d'image optimale.**

- ✓ Améliore le flux digital pour la prise d'empreintes optiques.
- ✓ Des scans clairs et lisibles, en un geste.
- ✓ Instrument sans latex, entièrement autoclavable jusqu'à 60 cycles.





SCAN-MATE S'ADAPTE À TOUS VOS BESOINS DE RÉTRACTION ET D'ISOLATION DENTAIRE

- Un seul outil de rétraction pour toutes les procédures ou examens dentaires.
- Dispositif non réfléchissant pour une numérisation optimisée, de la restauration unitaire à l'arcade complète.
- Idéal pour tous les cas de prise d'empreintes optiques – couronnes, bridges, implants et orthodontie.
- Optimise le confort de prise en main des scanners intra-oraux, des lasers et des aéropolisseurs.
- Le manche ergonomique et résistant améliore le contrôle et la qualité de l'image.
- L'embout souple et flexible permet une rétraction en douceur, et facilite l'accès aux zones difficiles d'accès.

SCAN-MATE TRANSFORME VOTRE FLUX DIGITAL

- Réduit le temps de scannage et permet une numérisation plus nette.
- Améliore l'expérience du patient et sa première impression en fauteuil.
- Optimise les performances du scanner pour une haute qualité d'image.
- Simplifie le geste.

OPTIMISE LE CONFORT DU CHIRURGIEN-DENTISTE ET DU PATIENT

- Scan-Mate peut être utilisé pour la prise d'empreintes optiques et tout autre geste nécessitant une rétraction.
- Plus besoin de vos doigts, d'un miroir ou d'autres outils d'isolation.
- Le cou flexible breveté et le manche ergonomique du Scan-Mate garantissent un confort en toutes circonstances : occlusion, deuxième molaire postérieure, distal inférieur, langue en mouvement, lèvres serrées...
- Durée de nettoyage post-scannage réduite.
- Conçu sans latex.

AUTOCLAVE

- Autoclave entre 121°C et 134°C (250°F à 273°F) pendant au moins 20 minutes (le temps peut varier en fonction de la durée de chargement et de l'autoclave utilisé).
- Autoclavable 60 cycles. À remplacer après un mois.
- Le cou ajustable de Scan-Mate s'affaiblit naturellement au bout d'un mois.
- Pour assurer l'efficacité du produit, ne pas dépasser la limite recommandée.